


シャワートローリーの清掃方法

洗浄:患者毎に実施する

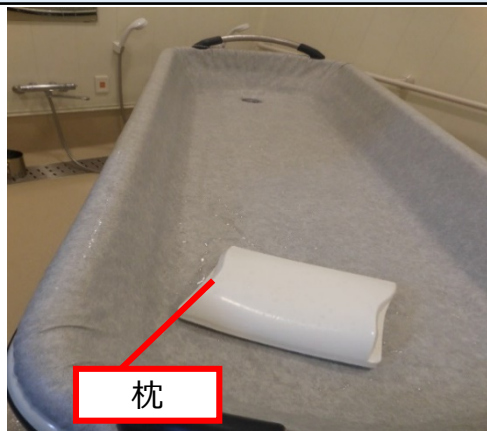

- ① 中性洗剤(バスマジックリン®など)を用いて洗浄。枕や側面、持ち手部分もまんべんなく洗い流す。
- ② 蛇管に溜まった水は最後まで出し切る。
- ③ 全体の水気を拭き取る、もしくは自然乾燥させる。

消毒:その日の最後にシャワートローリーを使用した患者の後に洗浄に追加して実施

※接触予防策実施中の患者に使用した場合は、毎回消毒まで必要


* 通常の中性洗剤を用いた洗浄の後に実施する

- ① 枕や側面、持ち手部分、ベッドコントローラーを含め全体的にルビスタ®で拭き上げる。
(ハクゾウジアパック®は金属腐食性があるため使用しない)
- ② 排水口から0.1%ハイター液を流し、蛇管内に30分間溜める。
排水後、蛇管内を水で流す。

排水口に0.1%
ハイター液を流す



排水口から流したハイター液が蛇管内に溜まる

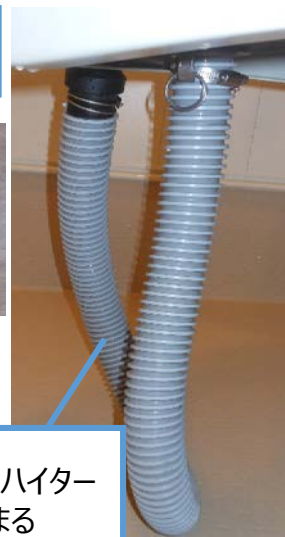

先端までハイター液が届いていることを確認
(蛇管内を満たす)

0.1%ハイター液の作成方法

【例】水10Lに対し6%病院用ハイター®170ml

※作成しやすいよう濃度を上回るおおよその数値です